


Wkład ssący jednorazowy do butli ssaków elektrycznych

7E-H1 / 7E-G1


W celu zapoznania się z przeciwwskazaniami, ostrzeżeniami lub środkami ostrożności należy zapoznać się z instrukcją użycia. Przed użyciem należy uważnie przeczytać i stosować się do instrukcji użycia. Alternatywnie, produkt należy zakupić i stosować pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia.

YY-ATT0007E-II(A/I)

Schemat urządzenia

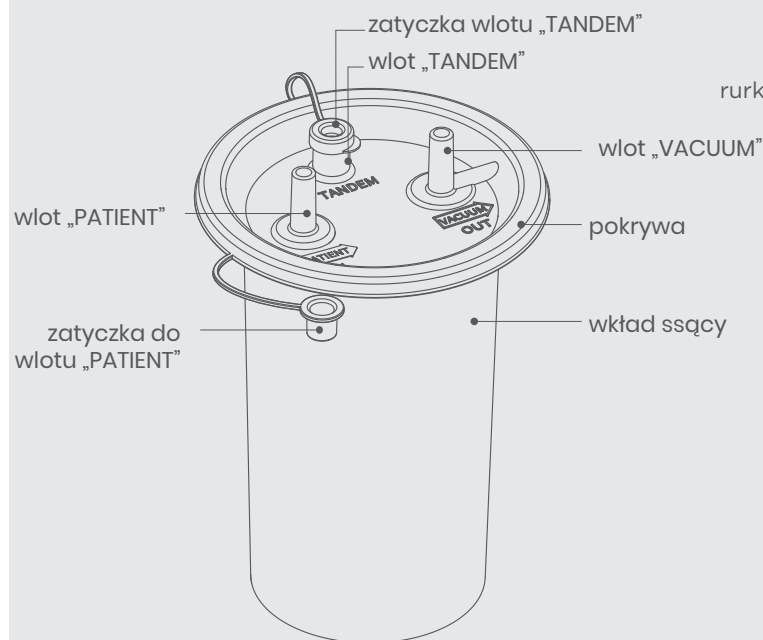

Wkład ssący jednorazowy

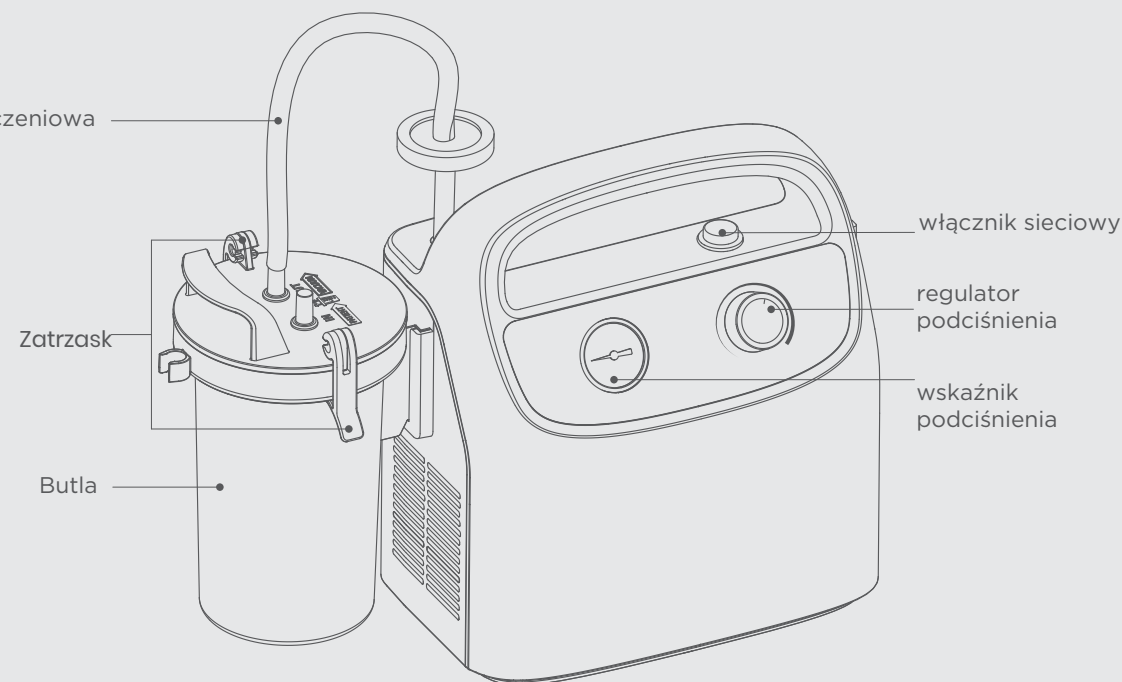

Przeznaczony do stosowania z ssakiem elektrycznym (Modele: 7E-G1 / 7E-H1)


Rysunek ma charakter poglądowy. Należy kierować się rzeczywistym produktem.

Montaż wkładu ssącego


1 Otworzyć opakowanie i wyjąć wkład ssący.




2 Odłączyć rurkę łączeniową, zwolnić boczne zatraski i zdjąć pokrywę butli.

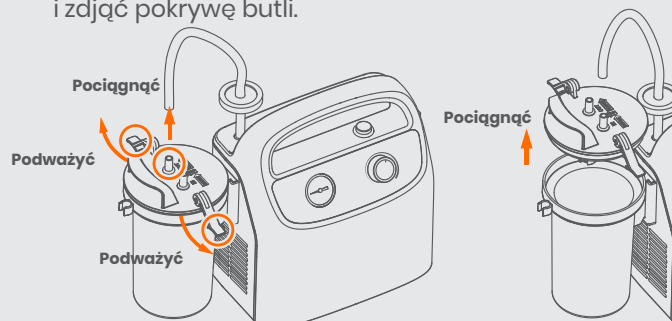

3 Skierować strzałkę „VACUUM” na wkładzie ssącym w stronę urządzenia. Wcisnąć wyprostowany wkład ssący do pojemnika, aż do jego prawidłowego osadzenia. Wskazówka: zwilżyć wlot pojemnika wodą destylowaną, aby ułatwić montaż i zapewnić lepszą szczelność.

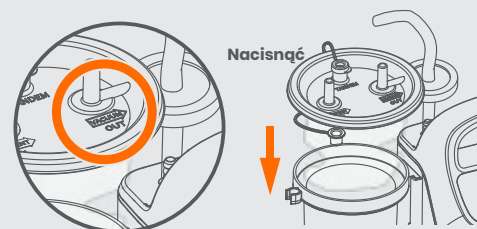


4 Podłączyć rurkę łączeniową do wlotu „VACUUM” wkładu ssącego.

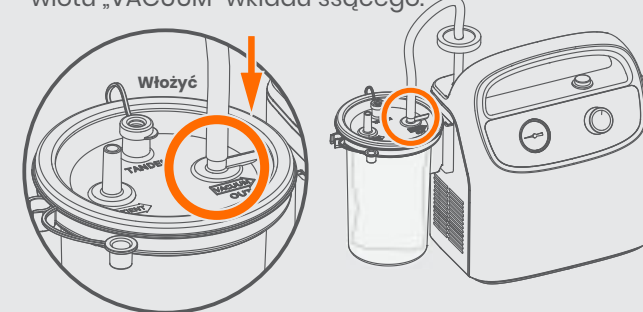

5 Włączyć urządzenie i ustawić maksymalne podciśnienie; wkład ssący powinien całkowicie się rozprężyć i ściśle przylegać do ścian pojemnika. Po potwierdzeniu prawidłowego przylegania zmniejszyć podciśnienie do minimum i wyłączyć urządzenie. (Jeżeli wkład nie przylega prawidłowo: chwilowo zatkać wlot „PATIENT” palcem i powtórzyć czynność)




Obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do maksymalnego podciśnienia.

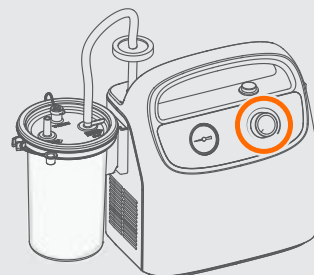


Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do minimalnego podciśnienia, a następnie wyłączyć urządzenie.

6 Podłączyć rurkę ssącą do wlotu „PATIENT” wkładu ssącego. W razie potrzeby drugi wolny koniec rurki ssącej podłączyć do cewnika ssący.

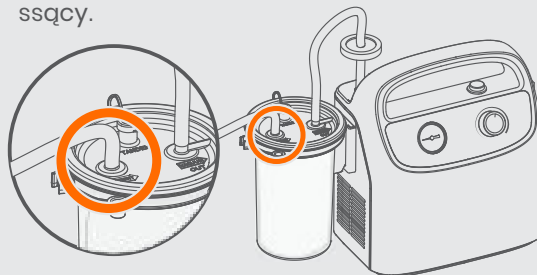


*Stosować zgodnie z rzeczywistymi warunkami użytkowania.

7 Włączyć urządzenie i ustawić odpowiednie podciśnienie.

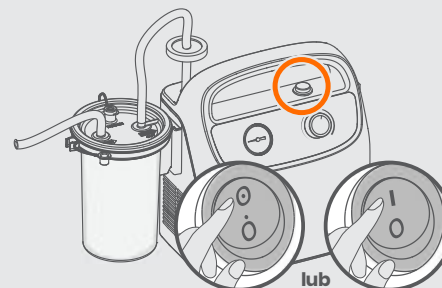

8 Odłączyć rurkę łączeniową oraz rurkę ssącą. Zamknąć wlot „PATIENT” za pomocą dołączonej zatyczki. Wyjąć napętniony wkład ssący i wyłączyć urządzenie.

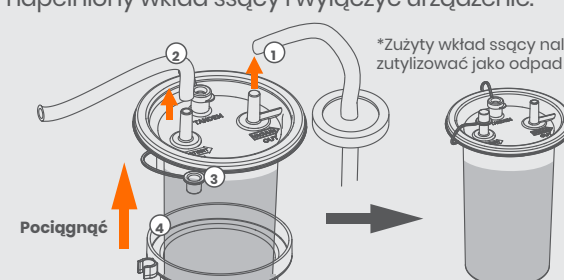

*Zużyty wkład ssący należy zutylizować jako odpad medyczny.